


口腔ケア用綿棒

爽快綿棒ハーフ




片側巻綿タイプの
口腔ケア用綿棒です。


使用方法

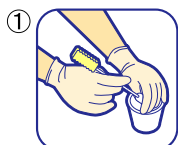


① 綿棒に水を含ませ、軽くしぼります。

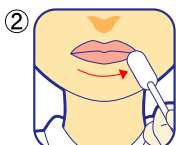


② 濡らした綿棒で唇に軽く触れ、片方の口角から口腔内に綿棒を入れます。

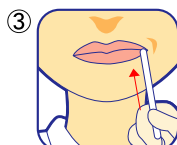

③ 上顎と下顎の接点の所まで綿棒を入れます。

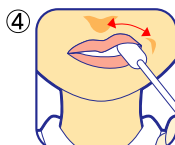


④ 綿棒を歯肉に沿って左右に動かし口腔前庭をきれいにしていきます。

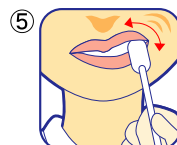


⑤ 次に口の周りや頬の筋肉を伸ばしながらほぐしていきます。




⑥ 下顎も同じように刺激し口腔内全体をきれいにします。

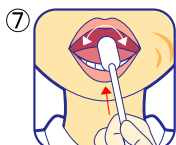


⑦ 口腔内の観察をし口蓋に半円を描きながら、或いは奥から手前に綿棒を動かしてケアします。

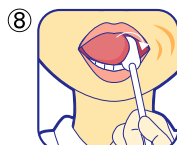

⑧ 舌の上を綺麗にして中央から側面に沿わせ舌の下に移動し、唾液の分泌を促します。

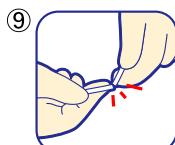

⑨ 綿棒でのケアが終了次第綿棒部分だけ折り曲げて捨てます。

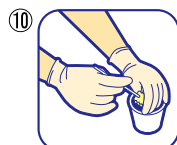

⑩ さらにスポンジで同じ行程を行い、異なる刺激で口腔内をケアします。



品番	規格	包装	1 梱入数	JAN コード
1240012	片綿付長さ 20.5cm	200 本 / 箱	20 箱	 4 958286 303154



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業部 ☎06-6809-4318 京都営業所 ☎075-603-4826
 東京支店 ☎03-3522-6720 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900
 神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911
 仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921
 西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253
 三河営業所 ☎0564-54-5447 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 三重営業所 ☎059-350-3844